



介護職員さんの腰痛予防と利用者様の苦痛緩和

力まかせ・抱きかかえ介助の見直しに。

福祉用具貸与品

車いす等の移乗（トランスファー）補助具

# 移乗補助具 はなまる

はなまるを活用した移乗で苦痛を取り除き、自立心を向上させます。安全・安心と、腰痛予防に。



抱きかかえの移乗には、介助者側、要介護者側双方に苦痛が伴います。「はなまる」は、車いす利用者でも、立位が取れる方や、腰浮かしが出来る方を移乗するための用具として開発されました。

×抱きかかえ移乗



はなまるは、健常者が移乗する時と同じ視線、前屈姿勢、手の動きを邪魔することなく本人の力を最大限に使うための福祉用具です。

## 【使用方法】

1. 対象者に端座位をとらせ、お尻の下にはなまるを敷き入れます。対象者に立ち上がりを促し、立ち上がりのサポートを行い、対象者が利き腕を利用し、車いすに手をつき移るまでの一連を、安全、安心の内に行える様に使用します。
2. 対象者の自力で移動する様に、介助者はどこにも力を掛けない。
3. 対象者の動きに合わせて移乗をサポートして下さい。


## 【選定する際の注意点】

1. 対象者の身体状況として、下半身に力が入らない方が予想されます。はなまるが適当か否かは注意して判断してください。
2. 身長差に注意が必要です。

持ち上げ介助ゼロ

検索

YouTube  
動画でチェック!

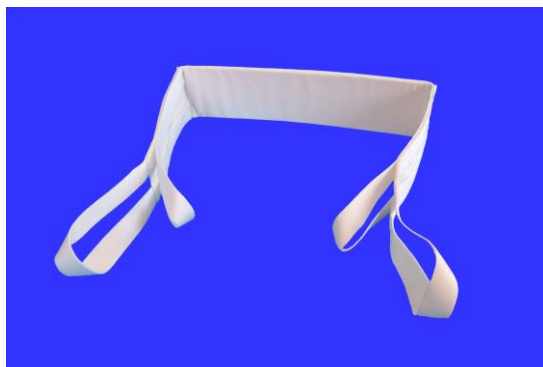

サイズ／幅10×長さ35×厚さ0.5cm  
材質／帆布：綿100% 起毛布：綿100%  
ベルト生地：アクリル100% 中板：ポリプロピレン

商品名：移乗補助具 はなまる

用途：寝たきりでない人、座位がとれる人への移乗支援

効果：自立への介助を目的とし、ベッド⇄車いす、車いす⇄椅子への移乗に使用。要介護者の残存能力の活用により、介助者の腰への負担を最小限に軽減でき、要介護者の苦痛を緩和させる事ができます。

標準価格 12,000+税

TAISコード 01341-000003