

取扱説明書



頭がしっかり乗るように
楽シートを敷く

①



足ポケットは、症状に合わせて
面ファスナーで調節

②



水平に移乗できるよう
ベッドの高さを調節

③



持ち上げず、水平に引く
頭部から先に移乗し

④



その後腰部を引き寄せる

⑤



楽シートの中心折れ部と
リクライニング腰部位置を合わせる

⑥

介護する方の腰痛予防と介護される方の苦痛緩和 水平移乗ボード楽シート

「楽シート」は従来2人がかりで抱えて移乗をさせていた方を、持ち上げずに楽にフルリクライニングキャリアへ移乗させるために開発されました。

○移乗の準備

介助される方の腕を組ませ、足を交差させ側臥位をとり、頭がしっかり乗るよう、「楽シート」を体の下に敷きます。

膝を曲げ足先をポケットに差し込みます。写真①③



膝・足・股関節の障害、骨粗しょう症の方は、無理に曲げたり、ポケットに差し込まないで面ファスナーで調節して下さい。写真②

水平に移乗できる様に、ベッドの高さを調節します。昇降機能のベッド、フルリクライニングキャリア、ストレッチャーを上手に利用しましょう。

フルリクライニングキャリアに合わせてベッド頭部を少し上げると良いでしょう。

又、移乗先の安全確保に特に気をつけて行います。(タイヤブレーキを確認する。

移乗先への隙間、距離を極力無くす。)写真③

○ベッドからフルリクライニングキャリアへ

楽シートに乗った状態の方を、ベッドの端に寄せます。写真③

両手で2箇所、頭・腰部の取っ手を握り、頭部から先に移乗させます。頭部握り手を引き寄せ、反対に腰部握り手は押し戻す要領です。頭部がしっかりフルリクライニングに乗ったら、腰部を引き寄せます。写真④⑤ ここまでの移乗行為はできるだけゆっくりと行います。

移乗ができれば足先をポケットから外し、両肘あて部を上げ、背リクライニングを戻してあげます。その時介助される方が下方にズレ落ちている状態であれば、楽シートの上部を持ち、引き上げます。楽シートの中心折れ部とリクライニング背折れ部位置を合わせましょう。写真⑥

取扱い上の注意

- ・洗濯は手洗いに限ります。40℃以上の温水で洗濯しないでください。
- ・洗濯後は、十分に自然乾燥させ使用してください。
- ・過剰に蒸れた状態や、湿った状態での使用は、効果を著しく減少させます。
- ・80kg以上の方への使用は避けてください。
- ・本品に人を乗せ、担架の代わりに担いだり、運んだりしないでください。
- ・人の介助としての水平移乗以外の使用をしないでください。
- ・使用方法をよく読み使用してください。

材質

表面素材 帆布 綿 100% 光沢布 ポリエステル 100%
中板素材 発泡ポリエチレン(クッションタイプ:体圧分散天然ゴムクッション)

洗濯表示

- ドライクリーニングはしない
- 塩素・サラシ入りの洗剤は使用しない
- 洗濯後は陰干しする
- 洗濯水温は40℃以下で行う
- アイロンは使用しない
- クッション素材は取り外してから洗濯する

持ち上げ介助ゼロ

検索

YouTube
動画でチェック!



●楽シート160 幅390×長さ1620×厚さ17mm

型番 AKR-06N-160 TAISコード 01341-000007

●楽シート160K クッションタイプ幅400×長さ1620×厚さ57mm

型番 AKR-06N-160K TAISコード 01341-000008

【開発製造販売元】

株式会社あかね福祉

TEL024-937-5022

